

# MMO5000

# medstrom<sup>+</sup>

Improved Patient Outcomes



**MMO**<sup>®</sup>  
M E D I C A L

# MMO5000



Das Bett MMO5000 wurde für die Krankenhausumgebung entwickelt und dient der Ausstattung von spezialisierten Pflegebereichen. Mit seinen zahlreichen Funktionen erleichtert MMO5000 die Pflege und gewährleistet Sicherheit, Komfort und Ergonomie für den Patienten und das Pflegepersonal.



MMO5000 mit geteilten Seitengittern.



Das Unternehmen MMO ist darauf spezialisiert, medizinisch effiziente Betten zu entwickeln. Das Bett MMO5000 ist ein echtes Arbeitsinstrument und dafür ausgelegt, den Patienten unter allen Umständen behandeln zu können. Es trägt aktiv zur Genesung des Patienten bei.



## Die Bedürfnisse erfüllen



### Des Patienten

- Sicherheit
- Würde
- Genesung
- Einfache Bedienung
- Komfort



### Des Entscheiders

- Einhaltung der Normen
- Preis-Leistungsverhältnis
- Gebrauchsfertige Lösung
- Weniger Arbeitsunfälle
- Garantie



### Des Pflegepersonals

- Sicherheit
- Reinigungsmöglichkeit
- Ergonomie
- Einfache Bedienung
- Klinische Schulung



### Des Wartungspersonals

- Technische Schulung
- Zuverlässigkeit
- Kundendienst
- Technischer Hilfsdienst
- Hotline rund um die Uhr - 7 Tage die Woche - 365 Tage im Jahr

## ERGONOMIE



Die Vorteile der Komfort-Position:

- Bessere Verteilung der Auflagepunkte.
- Reduzierung der Druckpunkte in den Sensiblen Bereichen
- Aufrechterhaltung der Lungeneffizienz.



Durch die fußseitige Bewegung kann der Patient in die Sessel-Position gebracht und in völliger Sicherheit im Bett aufgesetzt werden.

Durch die kopfseitige Bewegung kann die Pflegekraft den Patienten ohne Kraftaufwand in Richtung Kopfende des Bettes verlagern.





Die 2 am Kopfende gut zugänglichen CPR-Griffe befinden sich auf beiden Seiten der Rückenlehne und ermöglichen die schnelle mechanische Notabsenkung

## Bewegung der Liegefläche

Die synchrone Bewegung der Liegefläche über 23 cm verhindert Komplikationen durch die Kompression der Organe des Unterleibes.

Gleichzeitig werden dadurch "Reibungen" und "Scherbewegungen" vermieden, die für die Entwicklung wund gelegener Stellen verantwortlich sind.

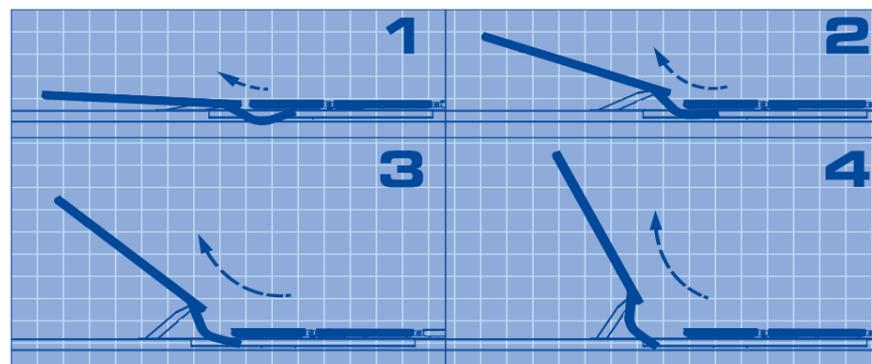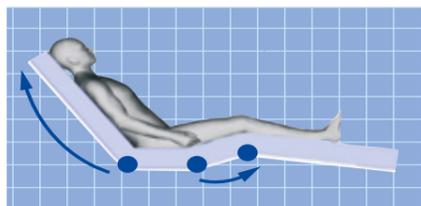

## Desinfektion und Bekämpfung von nosokomialen Infektionen

Die glatten und herausnehmbaren Oberflächen erlauben eine perfekte Dekontamination des gesamten Bettes MMO5000. Das Fehlen eines niedrigen Rahmens und die besondere Manövrierbarkeit des Bettes ermöglichen eine vollständige Zugänglichkeit für die Zimmerreinigung.



Bodenreinigung  
Einfache

## SICHERHEIT

### Optimale Absicherung gegen Stürze



Das Bett MMO5000 garantiert dem Patienten während seines Krankenhausaufenthalts Sicherheit und Schutz:

- Besonders niedrige Liegeposition von 19 oder 21 cm über dem Boden je nach Raddurchmesser.
- Patientenspezifische Höheneinstellung, um das selbstständige Aufstehen zu ermöglichen.
- Geteilte Seitengitter oder Seitengitter mit 3 Stangen für bis zu 15 cm dicke Matratzen oder 4 Stangen für bis zu 26 cm dicke Matratzen.



Europäische Richtlinien  
93/42/CEE  
NF EN 60601-2-52



Stürze sind noch zu häufig die Ursache schwerer Verletzungen und einer Verlängerung des Krankenhausaufenthalts: 80 % der Stürze finden im Zimmer, 60 % in der unmittelbaren Bettumgebung statt.

## Zentrale Bremsfunktion

Das MMO5000 ermöglicht eine zentrale und gesicherte Abbremsung:

- Automatische Arretierung 22 oder 24 cm über dem Boden (je nach Rollengröße)
- Ein zusätzlicher Tastendruck löste die zentrale Bremsfunktion in Verbindung mit einem Lautsignal aus.
- Definitive Arretierung 19 oder 21 cm über dem Boden (je nach Rollengröße)




# BEQUEM

## Bewegung und Handhabung

Die 8 multidirektionalen Rollen mit 100 mm Durchmesser ermöglichen eine einzigartige Manövrierbarkeit. Es ermöglicht eine mühelose Fortbewegung des Bettes in alle Richtungen bei der Zimmerreinigung. Im direktionalen Modus erweist sich das Bett lit MMO5000 noch flexibler und garantiert eine problemlose Handhabung durch eine Einzelperson.



Multidirektionale Räder

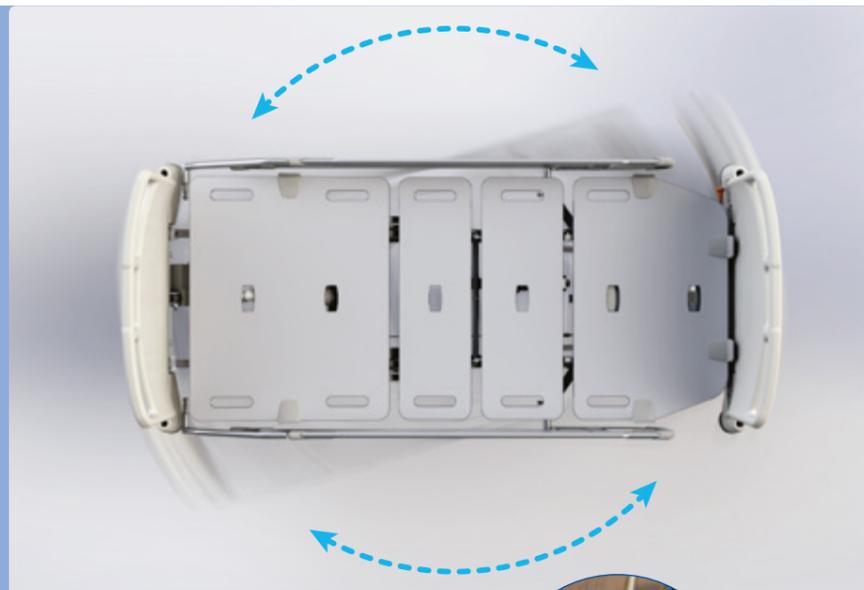


Der Wandanschlag sichert das Bett an der Wand. Er ermöglicht ein rasches und problemloses Positionieren. Der Anschlag kann bei längerem Fahren mit dem Bett eingezogen werden.



Vereinfachte Installation des Bettes

## Bremse, Kopf- und Fußteile und Seitengitter

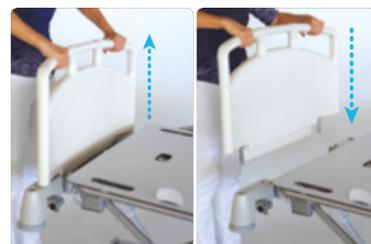

### Zugänglichkeit der Bremse

Die zweiseitige Bremsfunktion kann an der Vorder- und Hinterseite sowie an den Seiten des Bettes durch einfache Fußbedienung betätigt werden.

### Automatische Bremsung

Wenn das Bett seine niedrigste Einstellungshöhe erreicht, wird es automatisch abgebremst.




Einfache einhändige Bedienung der Seitengitter


Die geteilten Seitengitter sichern die Liegefläche des Bettes MMO5000 und verhindern einen Sturz des Patienten. Außerdem unterstützen sie die Mobilisierung zum Ausstieg aus dem Bett. Die Liegefläche des Bettes ist während der Pflege im Thorax-, Abdomen und Beckenbereich gesichert. Der Zugang zum Patienten ist unkompliziert und erfolgt durch einfaches Absenken des Seitengitters des betreffenden Bereiches. Durch das Anbringen von Schutzüberzügen.



Geringer Raumbedarf bei abgesenktem Seitengitter.

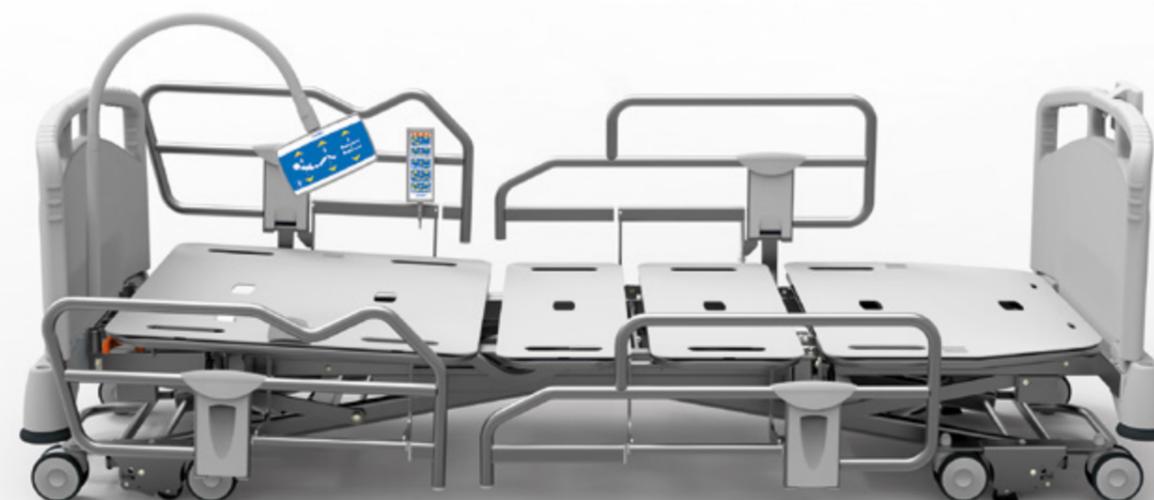

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

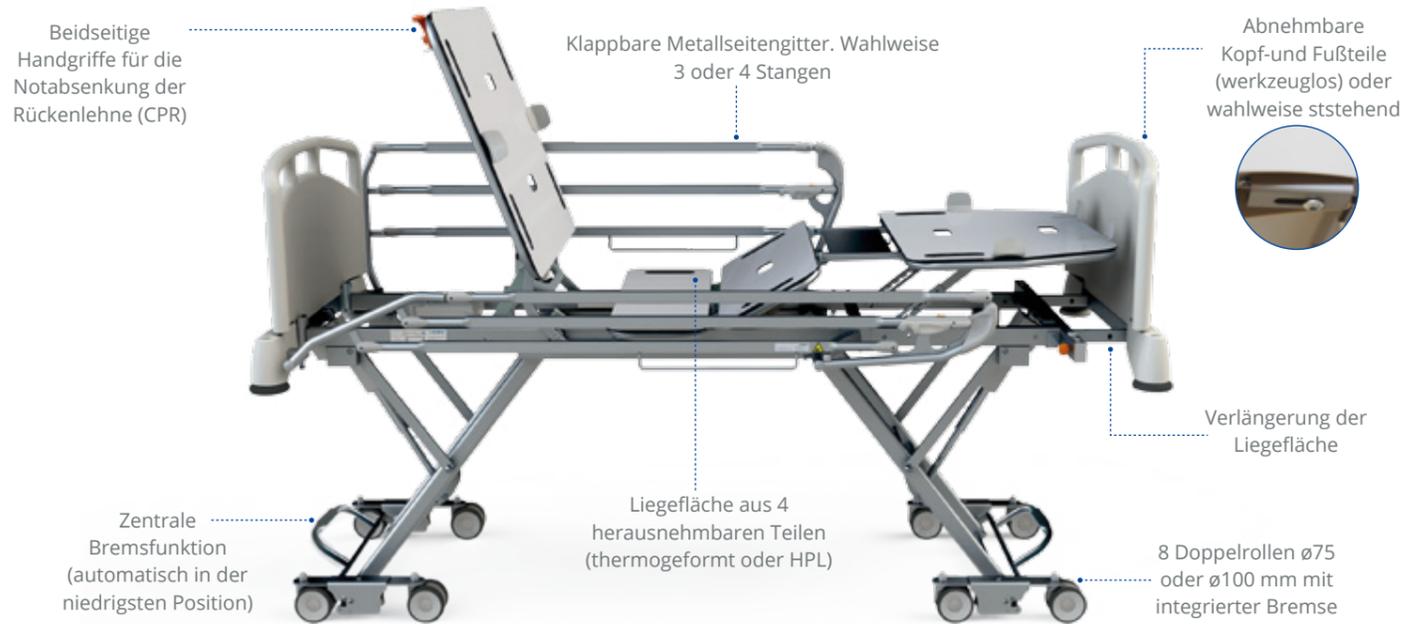


## Kunststoff Kopf- und Fußteile




<http://www.mmomedical.fr/les-outils-mmo.html>

## Fernbedienung

Vorprogrammierte Bettpositionen

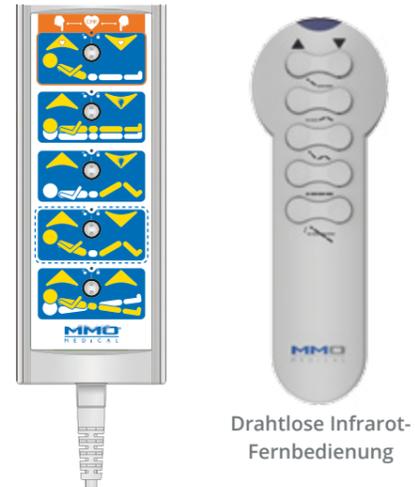

## ZUBEHÖR

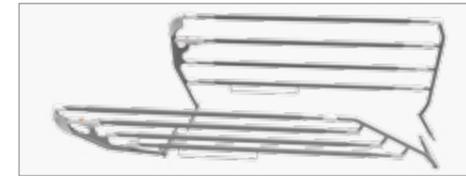

Satz Klappbare Seite gitter aus Metall:  
3 Stangen für Matratzen mit einer Dicke bis zu 15 cm  
4 Stangen für Matratzen mit einer Dicke bis zu 25 cm



Gepolsterte Bezüge für Metallseitengitter 3 oder 4 Stangen



Satz Verschlüsse für klappbare GSeitengitter 3 oder 4 Stangen




Einfacher Patientenaufrichter Epoxy-beschichtet mit verstellbarem Haltegriff



Einfacher Patientenaufrichter, Epoxy-beschichtet, Haltegriff + Aufrollautomatik



Drehbarer Patientenaufrichter Epoxy-beschichtet, Haltegriff + Aufrollautomatik

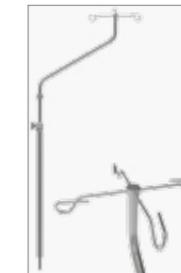

Teleskop-Infusionsständer aus Edelstahl, 4 Haken



Infusionsständer, Epoxy-beschichtet, 2 Haken



Integrierte Verlängerung der Liegefläche 18 cm



Wandanschlag ausziehbar



FernbedienungsHalterung



Flexible FernbedienungsHalterung



Urinflaschenhalterung Dreieckig




Urinflaschenhalterung rund



Zubehörset Stangenhalterung



Gehäuse Pflegepersonal mit Sperrfunktion

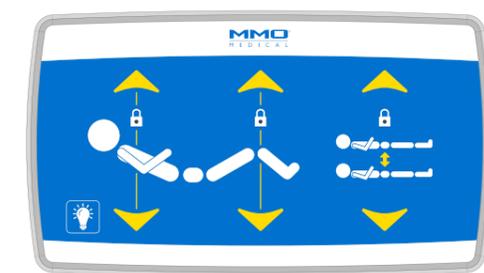

Patienten-Satellit

### Technische Eigenschaften

- Maße der Liegefläche: 200 x 90 cm
- Gesamtbreite x -länge: 99,8 x 214 cm
- Gesamtbreite x -länge mit Gitter 99,8 x 214 cm
- Min./ Max. Betthöhe 19 cm/83 cm
- Trend- / Antitrendelenburg 14°/+14°
- Neigungswinkel der Rückenlehne 70°
- Neigungswinkel der Unterschenkellehne: 30°
- Neigungswinkel der Beinlehne 20°
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Max. Hublast: 350kg
- Verlängerung

### Standard-Konfiguration

- Verstellbare Höhe und elektrische Rückenlehne
- Verstellung der Rückenlehne um 23 cm
- Notabsenkung der Rückenlehne CPR
- Manuelle All in One-Einstellung der Beinlehne
- Kabelfernbedienung mit selektiver Deaktivierung der elektrischen Funktionen
- 4 Halterungen für den Infusionsständer: 2 am Kopfende und 2 am Fußende

### Optionen

- Seitliche Handgriffe für die Notabsenkung der Rückenlehne (CPR)
- Elektrische Unterschenkellehne
- Integrierter Liegeflächenverlängerung von 18 cm
- Drahtlose Infrarot-Fernbedienung
- Infrarot-Sensor
- Zwei Fernbedienungen: Infrarot und kabelgebunden





MMO SAS mit einem Kapital von 735.300 € - Handels- und Firmenregister: RENNES - SIRET-Nr: 789 620 051 00019 - US-UNIC - FR-Nr: 789 620 051 - Eine eigene Modelle - Exklusivvertrieb von MMO - Jegliche Nachahmung oder Fälschung wird gemäß Gesetz Nr. 79/44 vom 18. Januar 1979 gerichtlich verfolgt. Dieses Dokument stellt keine vertragliche Grundlage dar. In dem Bestellen, ohne Produktvermerk, behält sich MMO das Recht vor, auf technischer und administrativer jegliche Veränderung einzubringen. Die Marke MMO ist ein von MMO eingetragenes Warenzeichen.

**medstrom<sup>+</sup>**  
Improved Patient Outcomes

**+** Schweiz  
Tel: +41 26 323 20 30  
Email: info@medstrom.ch  
[www.medstrom.ch](http://www.medstrom.ch)

**=** Österreich  
Tel: +43 2877 930 01  
Email: info@medstrom.at  
[www.medstrom.at](http://www.medstrom.at)

**MMO**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

FIRMENSITZ, WERK UND VERWALTUNGSSTELLEN:  
24 Route de Beauvais - BP 90148 - 35501 VITRÉ cedex - FRANCE  
Téléphone : +33 (0)2 99 75 04 50 - FAX : +33 (0)2 99 74 65 71  
Email : info@mointernational.fr  
[www.mmointernational.fr](http://www.mmointernational.fr)

Einige in diesem Dokument, dargestellten Farben können sich entsprechend den Entwicklungen unserer Farbpalette ändern.

